




Freiwillige Covid Testangebote:

Sie haben die Möglichkeit ein bis maximal zweimal pro Woche einen kostenlosen Test, in der Kita, zu bekommen, um diesen mit Ihrem Kind zu Hause durchzuführen.

Ablauf ist folgender:



 Sie füllen die „Erklärung zum Selbsttest im häuslichen Bereich“ aus und geben diese unterzeichnet in der Kita ab.

Das Kitapersonal händigt Ihnen, pro Kind, einen Schnelltest  und eine kleine Covid-Test Karte  aus.

 Es wird eine Notiz zu der Testausgabe in der Kita vom Personal gemacht.

Den Test können Sie anhand einer genauen Anleitung ausführen, diese bekommen Sie in der Kita.

Sie testen gemütlich zu Hause  und notieren das Testergebnis auf der kleinen Covid-Test Karte  .

 Sollte der Test positiv sein, rufen Sie bitte in der Kita an.  Ist er negativ, können Sie sich auf den Weg in die Kita machen. Bei Unsicherheiten in der Durchführung kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Inhalt Covid – Testpaket:

Covid Testkarte muss in der Kita abgegeben werden:



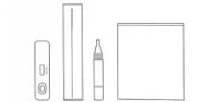










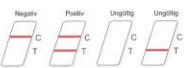
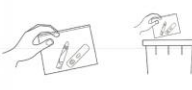



Covid Test Karte



Name: _____
 Ergebnis: _____
 Datum: _____
 Unterschrift: _____

Anleitung:

 <p>WANTAI SARS-COV-2 Ag Schnelltest (kolloidales Gold) (Anteriore Nasentupfer & Speichel)</p> <p>Anleitung zur Bedienung</p> 	<p>Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen. • Nehmen Sie alle Komponenten heraus und legen Sie sie auf den Tisch. <p>Testkomponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 * Testkassette 1 * Extraktionsfläschchen (0,3 mL) 1 * Gebrauchsanweisung 1 * Steriler Einwegtupfer 1 * Bedienungsanleitung  <p>Sie können den QR-Code scannen, um das Bedienungsvideo anzusehen.</p> 	<p>Schritt 1. Probe sammeln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Tupferbeutel. • Sie können zwischen zwei Probenentypen zur Entnahme wählen: <p>Anteriore Nasentupferproben: Führen Sie die gesamte saugfähige Spitze des Tupfers in Ihr Nasenloch ein und drehen Sie ihn langsam in einer kreisförmigen Bewegung gegen die Innenseite Ihrer beiden Nasentücher.</p>  <p>Oder:</p> <p>Speichelproben: Führen Sie die gesamte saugfähige Spitze des Tupfers in Ihren Mund ein und wischen Sie langsam über den oberen Gaumen und die Innenseite der linken und rechten Wangen (Sammeln Sie eventuell auf dem Tupfer vorhandenen Speichel).</p> 	<p>Schritt 2. Extraktion der Proben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schrauben Sie den Deckel des Extraktionsfläschchens ab. • Legen Sie den gesammelten Tupfer in das Extraktionsfläschchen mit dem Puffer, drehen Sie den Tupfer kräftig, um ihn gut mit dem Puffer zu vermischen.  <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie den Tupfer gegen die Innenseite des Fläschchens, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer freizusetzen. 
<p>Schritt 3. Entfernen des Tupfers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie das Ende des Tupfers an der Bruchkante ab und lassen Sie den Tupferkopf in dem Fläschchen.  <ul style="list-style-type: none"> • Schrauben Sie den Deckel des Fläschchens fest. Brechen Sie den Deckel des Extraktionsfläschchens ab. 	<p>Schritt 4. Testen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Kassettbeutel und legen Sie die Kassette auf eine ebene Fläche.  <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie das Fläschchen zusammen, um drei (3) Tropfen der extrahierten Probe aus dem Extraktionsfläschchen in die Probenvertiefung der Testkassette zu geben. Warten Sie 15 Minuten.  	<p>Schritt 5. Lesen Sie die Ergebnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen Sie das Testergebnis 15 Minuten nach dem Einlegen der Proben ab, jedoch nicht mehr als 30 Minuten.  <p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie alle Komponenten in den mitgelieferten verschließbaren Plastikbeutel. Verschließen Sie den Beutel und werfen Sie ihn weg. 	 <p>Agglo GmbH & Co. KG Altheimer Zwerge Altheim, Alb-Donau-Kreis 71634 Altheim, Alb-Donau-Kreis Tel. +49 (0) 7340 6386 Fax +49 (0) 7340 929632 www.altheimer-zwerge.de</p>